

# BRUKSANVISNING

## LATEXFRI KOFFERDAM AV POLYISOPROPEN

### BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Latexfri kofferdam av polyisopren tillverkad av syntetisk polyisoprenpolymerer vars fysikaliska egenskaper liknar latex. Latexfri kofferdam innehåller inte de proteiner som finns i latex som kan orsaka allergiska reaktioner. Kofferdam i storlek 150 x 150 mm, tjocklek på 0,20 mm (+/- 0,025 mm). Specifikationerna är angivna med förbehåll för tillverkningstoleranser.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kofferdamen är en osteril engångsduk för icke invasivt bruk. Får endast användas av kvalificerad tandvårdspersonal för det beskrivna ändamålet.

### KONTRAINDIKATIONER

Det åligger tandläkaren att avgöra om den enskilde patienten lämpar sig för användning av kofferdam. Kofferdammen ska inte användas i fall då huden i det aktuella området är sprucken, då det är känt att patienten är allergisk och kan få reaktioner av typ IV eller vid andra kliniska tillstånd som tyder på att kofferdammen inte bör användas.

### VARNINGAR

- Produkten får endast användas av kvalificerade tandvårdspersonal med utbildning i användning av kofferdam.
- Använd inte kofferdammen om det finns tecken på att produkten är defekt. Kassera defekta produkter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Använd inte kofferdammen i något annat syfte än det som anges i denna bruksanvisning.
- Lagring, användning och frakt, se nedanstående avsnitt.
- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Produkten får endast användas på barn under överinseende av en kvalificerad tandläkare.
- Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk. Den lämpar sig inte för rengöring.

### SAMMANSÄTTNING

Syntetiskt gummi av polyisopren samt viktiga kemikalier och pigment för tillverkningen. Gummit har en ytbeläggning av magnesiumsilikat (talk).

### HÄLSORISKER

Polyisopren anses vara säkert och inte farligt att använda för personer med benägenhet att få allergiska reaktioner mot naturgummi.

Produkten innehåller bearbetningstillätsatser inklusive ditiokarbonat som kan orsaka sensibilisering genom hudkontakt och ge upphov till allergiska reaktioner av typ IV. Personer som vet att de är känsliga för ditiokarbonater ska undvika att komma i kontakt med produkten. N-nitrosaminbiprodukter till ditiokarbonat innehåller vanligtvis < 10 µg/kg (gräns 93/11/EEG för flaskspenar) när de testas enligt BSEN 12868. Magnesiumsilikat i de mängder som finns i produkten anses inte vara farligt, men kontakt med sprucken hud bör undvikas.

### BRANDRISK

Produkten är brandfarlig och bör hållas borta från öppna lågor under hantering och lagring. Förbud mot rökning i förvarings- och hanteringsutrymmen ska iakttas.

### ANVÄNDNING

1. Ta en kofferdam och en mall till en gummiduk.
2. Placera mallen ovanpå gummiduken och mät in den.
3. Använd en markörpenna för att markera den tand som ska isoleras.
4. Gör ett hål med en håltång för gummidukar.
5. Spänn ut gummiduken på en ram.
6. Bind tandtråd till en klammer och placera klammervingen i hålet.
7. Öppna klammern med hjälp av en klammertång och placera den runt tanden.

Obs! Håltången bör vara utformad för detta ändamål och vara i gott skick då duken annars kan rivas isär om man inte lyckas göra ett rent hål i duken. Använd inte dukar som är trasiga, sönderrivna eller missfärgade. Dukar som rivas isär under förberedelserna eller när de används ska omedelbart kasseras. Återvinn produkten enligt lokala föreskrifter när den har använts.

### FRAKT- OCH FÖRVARINGSANVISNINGAR

**Temperatur:** Förvaras i högst 26°C och i skydd mot direkta värmekällor

**Luftfuktighet:** Undvik fuktiga förvaringsförhållanden

**Ljus:** Undvik långvarig exponering av ljus, särskilt UV-ljus och starkt solljus.

**Metaller:** Se till att produkten inte kommer i kontakt med koppar och kopparhaltiga legeringar.

**Oljor och lösningsmedel:** Se till att produkten inte kommer i kontakt med oljor, lösningsmedel och fett.

**Brand:** Förvara och hantera produkten på behörigt avstånd från öppna lågor.


**Förpackning:** Produkten ska fraktas och förvaras i medföljande förpackning. Förslut förpackningen när den inte används. Om förpackningen uppvisar tecken på skada vid leveransen ska den returneras oöppnad till leverantören som då tillhandahåller en ny. Utgångsdatumet på produkten anges på förpackningen. Produkten får ej användas efter utgångsdatumet.


### RENGÖRINGSKRAV

Detta är en engångsprodukt så det finns inga krav på rengöring av produkten.

### ÖVERSÄTTNING

Tillverkaren tar inte ansvar för att översättningen av denna bruksanvisning till andra språk är riktig.


 Pro-Options AB  
Brännkyrkagatan 94, 117 26 Stockholm, Sverige  
© 2019 Pro-Options AB | Version 2.6

 Kofferdam är en medicinteknisk produkt klass I enligt regel 5 i Bilaga VIII av EU-förordning 2017/745 (MDR)

 Medicinteknisk produkt

 Lotnummer

 Artikelnummer


 Läs bruksanvisningen

 Latexfri

 Tillverkare

 Utg. dat.

 Förvaras i högst 26°C

 Förvaras i skydd mot solljus

 Engångsanvändning

 Lättantändligt