



Kiilto Pro Hydragel

Förbehandlingsmedel



Hydragel är ett förbehandlingsmedel för medicintekniska instrument som förhindrar att organisk smuts och sekret torkar in före rengöring. Den lättspridda, gelliknande sprayen bildar en skyddande hinna på instrumentens yta, vilket underlättar den efterföljande rengöringen. Produkten är vattenlöslig, lämplig för de vanligaste instrumentmaterialen och behandlade instrument bör rengöras inom 5 dagar.

Användningsområde	Förbehandlingsmedel för situationer där instrument inte rengörs direkt efter användning. Medicinteknisk produkt. För professionellt bruk.								
Produktegenskaper	CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I Förhindrar att organisk smuts och sekret torkar in Underlättar efterföljande rengöring av instrument Gelliknande spray som fördelas jämnt över ytan Vattenlöslig Lämplig för de vanligaste instrumentmaterialen Behandlade instrument bör rengöras inom 5 dagar								
Bruksanvisning	Använd en förvarings-/transportlåda med lock. Spraya Hydragel på instrumenten som ligger i transportlådan. Normalt behöver instrumenten inte sköljas av innan användning av Hydragel, men om de varit i kontakt med natriumklorid eller vissa medel som används för att stoppa blödning inom gynekologi så bör instrumenten sköljas av först för att undvika korrosion. Iakttä trygga arbetsförhållanden under förvaring och transport av instrument. Tvätta instrumenten som vanligt inom 5 dagar.								
Obs	Under förbehandlingsmedlet får inga kemikalier lämnas kvar som kan fräta eller skada metaller. Tvätta bort stänk med vatten. Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.								
Sammansättning	Aktiva ämen <table> <tr> <td>Nonjoniska ytaktiva medel</td><td>< 5%</td></tr> <tr> <td>Tvål</td><td>< 5%</td></tr> <tr> <td>Konserveringsmedel</td><td></td></tr> <tr> <td>Korrosionsinhibitor</td><td></td></tr> </table>	Nonjoniska ytaktiva medel	< 5%	Tvål	< 5%	Konserveringsmedel		Korrosionsinhibitor	
Nonjoniska ytaktiva medel	< 5%								
Tvål	< 5%								
Konserveringsmedel									
Korrosionsinhibitor									
pH konzentrat	9.0 svagt alkaliskt								
Förvaring	<28 °C. Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatumet.								
Utseende och doft	Oparfymrad, genomskinlig vätska.								

Tillverkningsland

FINLAND

Användar- och miljösäkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Hydragel förbehandling gel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Råvarorna är miljövänliga. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material.

Förpackningsmaterial

Flaska: HDPE plast
Spraymunstycke: PP plast
Transportförp.: kartong/pappersförpackning

**Förpackningsvolym /
Artikelnr.**

Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 750 ml	8222	6417964082227	6417964482959

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.