

HySolate Liquid Dam

Bruksanvisning SV

PRODUKTBESKRIVNING

HySolate Liquid Dam är en synlig ljushärdande flytande mikrohybridkomposit ämnad att skydda gingivan intill tänder som bleks.

AVSEDD ANVÄNDNING OCH KLINISKA FÖRDELAR

Gingivaskydd under blekningsförfaranden

PRESTANDAEGENSKAPER

Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven för avsedd användning.

KONTRAIKATIONER

Kontraindicerat vid fall av överkänslighet mot något av innehållsämnen i HySolate Liquid Dam.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

MÄRK

- Applikationsspetsarna är avsedda för engångsbruk.
- Omgivande ljus kan starta polymerisation av materialet.
- Använd inte harts för att justera materialets viskositet.
- Undvik kontakt med hud och ögon.
- Opolymeriserat material kan vara irriterande och kan leda till sensibilisering mot metakrylat.
- Ämnen som innehåller eugenol kan påverka polymeriseringen av HySolate Liquid Dam.
- Kommersiella medicinska handskar skyddar ej mot metylakrylaternas sensibiliserande verkan.
- Förvaras oåtkomligt för barn!

ANVÄNDAR-/PATIENTGRUPP

Produkten får enbart användas av kvalificerade tandläkare. Lämplig för alla patientgrupper.

KORREKT ANVÄNDNING

Isolera gingivan med bomullsrullar och gastork. Applicera HySolate Liquid Dam direkt från sprutan längs gingivakanten med bifogade applikationsspetsar. Skikten ska ha en tjocklek på minst 1–1,5 mm. Ljushärda med en kommersiell hårdljuslampa (våglängd 400–500 nm, ljusintensitet på minst 1000 mW/cm²) i 10 sekunder per tandbåge. Håll ljusutsläppets fönster så nära materialet som möjligt. Efter att blekningsförfarandet avslutats tar du bort HySolate Liquid Dam med en spatel eller pincett.

HÅLLBARHET/LAGRING

Förvara ej över 25 °C (77 °F). Skyddas från direkt solljus. Får inte användas efter angivet utgångsdatum. Förslut sprutan omedelbart efter användningen så att ljusexponering undviks.

KASSERING

Kassera produktavfall enligt gällande lagstiftning.

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Alla allvarliga incidenter som inträffar vid kontakt med den här produkten måste omedelbart rapporteras till tillverkaren och den ansvariga myndigheten (Läkemedelsverket i Sverige).

GARANTI

P. L. Superior Dental Materials GmbH garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsdefekter. P. L. Superior Dental Materials GmbH ger inga andra garantier inklusive underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Användaren är ansvarig för att fastställa produktens lämplighet för användarens applicering. Om produkten är defekt inom garantiperioden, är den enda korrigeringsåtgärden och P. L. Superior Dental Materials GmbH:s enda skyldighet är reparation eller utbyte av produkten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Förutom där det är förbjudet enligt lag, P. L. Superior Dental Materials GmbH är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som kan uppstå från denna produkt, direkt, indirekt, oavsiktlig eller påföljande, oavsett vilka förklaringar som hävdas, inklusive garanti, kontrakt, oaksamhet eller strikt ansvar.

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com

Glossary	
	Consult instructions for use
	Marking of Conformity Europe
	Medical Device
	Legal Manufacturer
	Swiss Authorized Representative
	Distributor
	Reference Number
	Expiry Date
	Batch Code
	Unique Device Identifier
	Single use only
	Keep away from sun light
	Temperature limitation



P. L. Superior Dental Materials GmbH
Stiller Weg 15 A
22607 Hamburg, Germany

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

Customer Center
service@coltene.com

