

STABILOK DENTINE PINS

Bruksanvisning

Innehåll

Avsedd användning

Symboler

Varningar och försiktighet

Förberedning av tanden:

Förfarande för placering av Stabilok-pin:

Modifiering av stiftet:

Förkortning

Böjning

Desinficering, sterilisering och förvaring

Dentine Pins

Tandborrar


Kassering



1639

Fairfax Dental
40 St. George's Road
London
SW19 4ED
Storbritannien

Tel: 020-897-6464
Fax: 020-897-2727
E-mail: admin@stabident.com

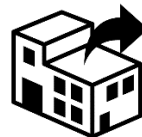

USA
Fairfax Dental Inc.
2937 SW 27 Ave
Suite #200B
Miami, FL 33133
USA

Tel: 1-800-233-2305
Fax: 305-476-7183
E-mail: fairfax@stabident.com



Fairfax Dental Ireland Ltd
Beechwood Close, Co Wicklow, Irland

Avsedd användning

Stabilok Dentine Pins är ett effektivt och ekonomiskt sätt att ge extra mekanisk retention för restaureringar i både främre och bakre tänder.

Väl på plats i tanden kan de reduceras på längden och/eller böjas till önskad position.

En stor fördel med Stabilok Dentine Pins är att stiftet säkert hålls fast i ett motvinkelskaft tills det är redo att automatiskt klippas av i tanden på rätt djup.

Symboler

Följande symboler används:



Tillverkare



EU-auktoriserad representant



Enbart engångsbruk (Dentine Pin)



Partnummer



Varningar och försiktighet




Försiktighet: Federal (amerikansk) lag begränsar försäljning av denna enhet till eller på beställning av licensierad sjukvårdspersonal



Distributör



Varningar och försiktighet

- Borren och stiften ska endast användas vid 2 000–5 000 rpm
- Tandstiften är endast engångsbruk 
- Säkerställ att stiften är desinficerade enligt instruktionerna
- Säkerställ att borrarerna är rengjorda och steriliserade före användning och mellan användning enligt instruktionerna
- Säkerställ att korrekt borrarstorlek används för stiften
- Använd den smalaste stiftstorleken för att reducera risken för sprickor

- Borrarerna kan återanvändas maximalt 20 gånger. Återanvändning fler gånger än så kan orsaka att borren blir slö och mindre effektiv
- Försök inte förkorta stiftet före det har placerats i tanden eftersom det skadar eller tar bort den avsmalnande spetsen som möjliggör självgångning

Förberedning av tanden:

Tanden som kräver placering av en Stabilok Dentine Pin ska rensas helt från karies och torkas med en luftspruta. Generellt krävs ett separat Stabilok-stift för varje spets som saknas. En preoperativ röntgenbild kan vara användbar för att identifiera positionen och storleken på pulpan.

Förfarande för placering av Stabilok-pin:

Placera en Stabilok-borr i en tandläkarbör med vinkelstycke och lås fast den. Med motorn igång med en hastighet av cirka 2 000 rpm, borra ett hål i tandbenet med en enda snabb in-ut-rörelse, var noga med att inte borra i emaljen eller pulpan av misstag. Stabilok-borren har en självbegränsande axel som förebygger för djup borring.

När stifthålet har borrats, ta bort borren från handstycket (borren ska steriliseras före den används igen).

Placera en Stabilok Dentine Pin i tandläkarborren och lås fast den. Med stiftet roteras i ungefär 2 000 rpm, sätt toppen av stiftet i öppningen av det förborrade stifthålet. Stiftet kommer då att självgångas till botten av det förborrade hålet och skäras av vid halsen som bildas i den gängade delen.

Modifiering av stiftet:

Stabilok Dentine Pin kan modifieras genom antingen förkortning eller böjning.

Förkortning

För att förkorta stiftet, gör följande: Placera en höghastighetsdiamant eller hårdmetallbör i en turbinbör. Placera tandläkarborren så att borren är vinkelrät mot Stabilok Dentine Pin och vid en punkt som motsvarar var stiftet ska skäras av. Med borren igång, för den försiktigt i kontakt med stiftet och låt den skära genom stiftet från den ena till den andra sidan. En försiktig axiell rörelse av borren till och från kommer att underlätta operationen.

Böjning

Stabilok-stift kan böjas en gång, efter att de har placerats i tanden. En amalgamskrapa kan användas genom att applicera den på stiftets spets och försiktigt böja stiftet till den position som krävs.

Stiftet ska inte böjas mer än en gång eftersom upprepad böjning kommer att försvaga stiftet och kan också försvaga dess retention i det förborrade hålet.

Desinficering, sterilisering och förvaring

Dentine Pins

Stabilok-stiften kan desinficeras före användning genom att placera dem i en kall steriliseringslösning, t.ex. Milton Sterilising Fluid (2 % w/w) i 10 minuter och sedan skölja dem med sterilt vatten före användning.

Tandborrar

Före första användning:

Stabilok-borrar ska steriliseras i en autoklav i 134 °C i 3 minuter.

Efter användning:



Allt skräp, tandben etc. ska tas bort manuellt från Stabilok-borrar, och de ska sedan sköljas och sedan steriliseras i en autoklav i 134 °C i 3 minuter.

OBS! Rengöring och sterilisering av borrarerna ska utföras direkt efter användning om praktiskt möjligt. Rengöring och sterilisering måste utföras inom 24 timmar före användning.

Hänvisa till lokala steriliseringsriktlinjer.

Mer detaljerade instruktioner för återanvändningsförfaranden finns tillgängliga på begäran.

För att minimera risken för korrosion, se till att borrarerna torkas med en lufttorkare före förvaring och förvaras i Stabiloks originalbehållare i en torr, ren miljö. Borrarerna kan steriliseras före användning om så krävs.

Kassering

Efter användning ska skaftet från vilket Stabilok-stiftet har skurits av försiktigt kasseras i en behållare för vassa föremål.

Efter 20 användningar ska tandborren försiktigt kasseras i en behållare för vassa föremål.